




Акционерное Общество  
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд»

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31  
Почтовый адрес: 105187, г. Москва, а/я № 51  
E-mail: mtl@mtl.ru; www.mtl.ru  
Тел.: +7 (495) 663-95-01; факс: +7 (495) 663-95-02

Требования к помещениям для установки и ввода в  
эксплуатацию аппаратно-программного комплекса  
«ДИАРМ-МТ» и принтера

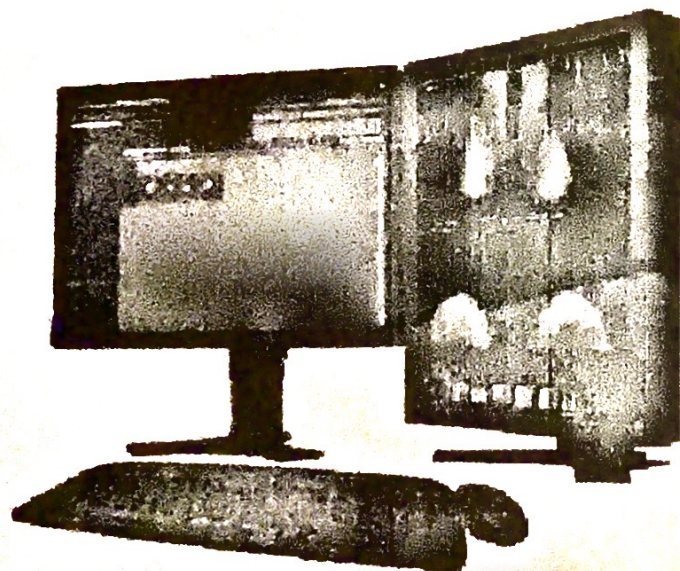

Помещение, планируемое под установку аппаратно-программного комплекса «ДИАРМ-МТ» должно соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В состав АРМ врача-рентгенолога входят персональный компьютер, медицинский монитор высокого разрешения (наличие и кол-во мониторов может отличаться в зависимости от поставки) и печатающее устройство рентгеновских снимков.

### **1 Общие требования**

Рабочая температура воздуха в помещении +10..+35 °С. Относительная влажность воздуха в помещении 30..75%.

### **2 Требования к размерам помещения**

2.1 Площадь для размещения каждого АРМ должна быть не менее 4,5 кв.м.

2.2 Минимальная высота потолка должна быть не менее 2,3 м.

### **3 Требования к коммуникациям**

3.1 Помещение должно быть оснащено сетевым подключением "Gigabit Ethernet " (максимальная расчётная скорость не менее 1 Гбит\сек) с сетевыми концентраторами "Hub".

3.2 Для каждого АРМ должно быть оборудовано не менее двух розеток "Ethernet"

3.3 Расстояние от концентраторов до розеток "Ethernet" АРМ не должно превышать 100м.

3.4 Все работы по прокладке кабелей, монтажу сетевого оборудования (не входящего в поставку) и подключению к локальной сети осуществляет Заказчик.

### **4 Требования к расположению оборудования**

4.1 Оборудование АРМ врача и печатающее устройство рентгеновских снимков могут располагаться в любом помещении лечебно профилактического учреждения, удовлетворяющем п. 2 и п. 3.

---

По вопросам логистики, монтажа и подготовки помещения: +7 (495) 663-95-01  
Мануилова Марина Владимировна доб.181,  
Быченкова Мария Валерьевна доб.177

Сервисная служба компании: +7(495) 785-24-59

## **5 Требования к электропитанию**

5.1. Помещение должно быть снабжено электрической однофазной трёхпроводной сетью 220 В (+/- 10%), 50 Гц.

5.2 Для питания каждого АРМ должен быть установлен блок из, не менее чем, трёх розеток с заземляющим контактом евростандарта.

5.3 Прокладка электрических кабелей в помещении должна проводиться в настенных или напольных коробах.

5.4 Проводка розеточной сети должна обеспечивать ток нагрузки 16 Ампер.

## **6 Приемка помещения**

6.1 АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» составляет за собой право посетить помещение перед началом монтажа оборудования, чтобы убедиться в выполнении всех подготовительных работ в соответствии с требованиями настоящего документа.

6.2 Помещение и прилегающие коридоры должны быть тщательно очищены от грязи и пыли. В помещении должны быть обеспечены заданные климатические условия.

6.3 Вызов представителя сервисной службы для монтажа оборудования или приемки помещения возможен после предоставления в АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» прилагаемого к проекту «Акта соответствия требований к помещениям для установки и ввода в эксплуатацию Оборудования» с обязательным заполнением всех граф и предоставления копий проверки заземления и характеристик питающей сети.

## **7 Ответственность заказчика**

7.1 Подготовка помещения в соответствии с требованиями по основным строительным работам, электропитанию, условиям эксплуатации, приведенными в данном комплекте документации, являются обязанностью Заказчика.

7.2 Все подготовительные работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями государственных и местных нормативов строительства и обеспечения безопасности.

7.3 Поставка любого оборудования и материалов, а также выполнение работ, которые четко не оговорены в заказе, поступившем в АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», должны быть обеспечены самим Заказчиком.

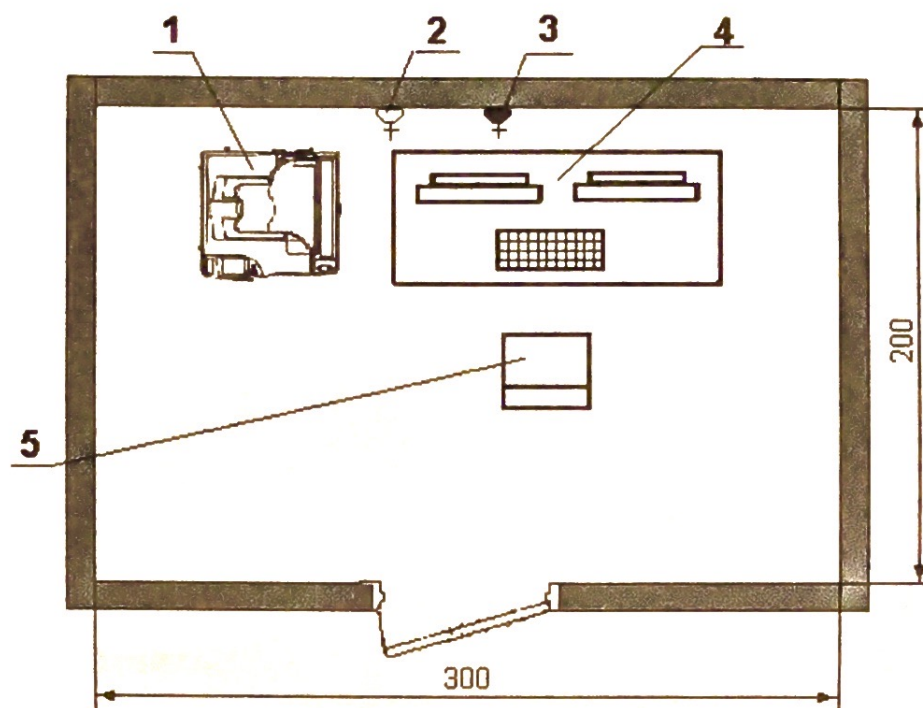


Рис. 1 Примерный план размещения оборудования комплекса «Диарм-МТ» (АРМ врача)

- 1 – Принтер
- 2 – \* Блок розеток 220 В
- 3 – \* Блок розеток Ethernet
- 4 – АРМ врача
- 5 – Стул

\* – В комплект поставки не входит

По вопросам логистики, монтажа и подготовки помещения: +7 (495) 663-95-01  
 Мануилова Марина Владимировна доб.181,  
 Быченкова Мария Валерьевна доб.177

Сервисная служба компании: +7(495) 785-24-58

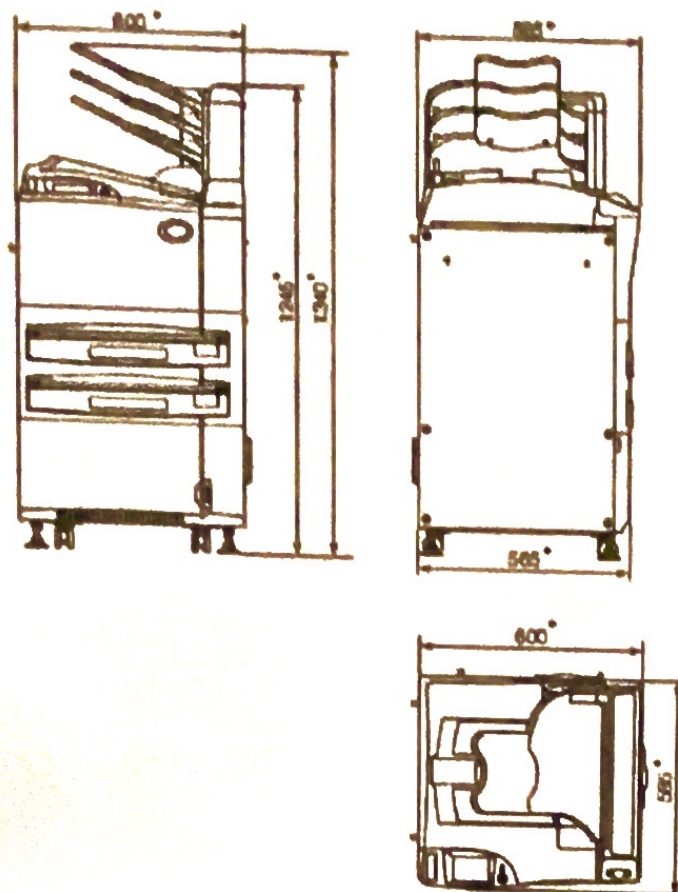


Рис. 2 Габаритные размеры медицинского принтера  
 (\*весогабаритные характеристики могут отличаться в зависимости от поставки)

По вопросам логистики, монтажа и подготовки помещения: +7 (495) 663-95-01  
 Мануилова Марина Владимировна доб. 181,  
 Бычелкова Мария Валерьевна доб. 177

Сервисная служба компании: +7(495) 785-24-58